

AESTHETIC VE2LHELIC prosthetics inc.

1095 N. Allen Avenue, Pasadena, CA 91104 • 626.345.0050 • fax 626.345.0052

Instrucciones para su prótesis de silicona Finger

Aplicación

- Coloque una pequeña cantidad de agua en el interior del dedo prótesis al ponerse la prótesis para asegurar un ajuste apropiado. Asegúrese de que toda el agua sea expulsada .
- OPCIONAL : Una vez prótesis es te completamente sobre y en la posición correcta , se puede utilizar un palillo para aplicar una pequeña cantidad de adhesivo Hydro -Bond a la parte inferior del borde de el prótesis para reducir la visibilidad de margen . Pegamento permanecerá blanco por un número de minutos hasta que se seque .
- Al retirar el prótesis , una pizca pared lateral de la prótesis para romper la succión.

Mantenimiento

- No pele con márgenes delgados para su eliminación.
- Limpie según sea necesario con gasa y alcohol de roce o algodón con alcohol .
- Cualquier pequeño desgarre en la silicona del prótesis deben ser trabajado por Prótesis estéticas tan pronto como sea posible.
- Si tiene mascotas animales, tenga cuidado de guardar la prótesis fuera de su alcance .
- No use su prótesis cuando usted duerma. Su piel necesita tiempo para ventilarse.
- Los productos que pueden dañar / acortar la vida útil de la prótesis :
 - Aceites (es decir, lociones, maquillaje , jabones humectantes, varnises)
 - Colorantes (es decir, tinte para el cabello , la ropa nueva de color oscuro sin lavar)
 - Los disolventes o productos de limpiezas (por ejemplo cloro, removedores de maquillaje cinematográficos)
- No utilice otros limpiadores , pegamentos o productos químicos en su prótesis sin consultar Prótesis Estéticas, ya que pueden contener ingredientes que son dañinos a la silicona . No nos hacemos responsables de los daños potencialmente irreversibles que pueden ser causados por el uso de productos no aprobados .

Pintada de Un a

Puede pintar su una, pero nunca use ningun acrilico anadido

Antes de anadir pintura de una, pinte una capa de base transparente a la una para prevenir que se manche.

La pintura de una solo debe ser quitada con un limpiador que no tenga acetona. Acetona standard derritira la una.

Si visita el salon de unas, sera recommendable que lleve su propio limpiador de una que no contenga acetone.

